



# Voando com as Borboletas

Soluções Hartmann para o cuidado **da pessoa com Epidermólise Bolhosa**



## HydroClean®

Feridas limpas com mais segurança e menos dor



Essa solução ajuda a garantir a limpeza e remoção das crostas

### Resumo de benefícios:

- Menos dor e trauma nas trocas
- Desbridamento suave sem fricção
- Redução da carga bacteriana
- Controle eficaz do exsudato
- Mantém a umidade adequada



### DESCRIÇÃO:

Curativo hidroativo estéril, não aderente. Composto por membrana de polipropileno, poliacrilato superabsorvente incorporado em fibras de celulose, ringer, podendo conter associações, camada superior de película hidrófoba de polipropileno e tiras de silicone. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente.

### Limpeza suave da ferida

A combinação de ringer com poliacrilato superabsorvente (SAP) promove a limpeza sem fricção ou enxágue, o que é essencial para pessoas com EB, onde a remoção mecânica de resíduos pode causar traumas.

### Controle da carga bacteriana

O curativo absorve exsudato e ajuda na remoção de resíduos, contribuindo com a redução do risco de infecção, sem o uso de agentes agressivos.

### Ambiente úmido controlado

Controla o exsudato e realiza liberação sustentada de ringer, mantendo o ambiente ideal para cicatrização sem ressecar ou encharcar.

### Não adere ao leito da ferida

Reduz significativamente a dor na troca do curativo, um dos maiores desafios no cuidado com a EB.

Soluções para saúde que transformam vidas.

# HydroTac®

## Inflamação e prurido sob controle



Essa solução ajuda na diminuição do processo inflamatório e também na gestão do exsudato.

### Resumo de benefícios:

- Possui exclusiva tecnologia AquaClear Gel
- Realiza o gerenciamento da umidade
- Absorção do exsudato
- Proporciona redução da dor durante o tratamento
- Atraumático e indolor nas trocas
- Gentil ao tecido perilesional



### DESCRIÇÃO:

Curativo composto por três camadas, uma de filme de poliuretano semipermeável, uma camada de poliuretano superabsorvente, flexível, macio, recortável e camada de contato composta de hidrogel de poliureia híbrido. Estéril, embalado em material que promove barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação vigente.

### Hidratação adequada com hidrogel

Mantém o ambiente úmido, favorecendo a cicatrização de pessoas com EB que tendem a ter feridas secas ou com crostas que dificultam a cicatrização.

### Conforto e flexibilidade

É leve e flexível, adaptando-se bem às curvas do corpo e proporcionando mais conforto para uso prolongado, inclusive em áreas de mobilidade.

### Ambiente ideal para cicatrização

Permite absorção equilibrada do exsudato ao mesmo tempo que hidrata com o hidrogel, mantendo o equilíbrio ideal que estimula a epitelização e a granulação.

### Não adere ao leito da ferida

Reduz significativamente a dor na troca do curativo, um dos maiores desafios no cuidado com a EB.



Acesse nosso Instagram para saber **mais e acompanhar conteúdos relevantes!**

verissaude.com.br